

Instrucciones de uso breves: maxium®

Estas instrucciones de uso abreviadas solo sirven como elemento auxiliar. No sustituyen la lectura y el cumplimiento de las instrucciones de uso completas!

KLS martin
GROUP



**Consulte el
instrucciones de uso**

Ajuste de los parámetros:
Mediante los botones de selección de canal **amarillos (corte) o azules (coagulación)**

Pulse 1 vez:
Para cambiar los valores de la potencia*

Pulse 2 veces:
Para cambiar el tipo de corriente*

Pulse 3 veces:
Para asignar el interruptor de pie*

* El valor del parámetro seleccionado se cambia a través del mando giratorio y se confirma el nuevo valor al presionarlo

Encienda el equipo mediante el interruptor de alimentación
(el programa base aparecerá inmediatamente o debe ser activado girando el mando giratorio hasta seleccionar "confirmar" y pulsándolo)

Selección de programas:

- Pulse boton **MENU**
- Gire el **mando giratorio** en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar al programa deseado
- Confirme el **programa seleccionado**, pulsando el mando giratorio



Entradas monopolares

Entradas bipolares

Entrada para la placa neutra

Visualización e indicador de conexión de la placa neutra

Conexiones posteriores

Entrada para el interruptor de pie con doble pedal

Entrada para el interruptor de pie con pedal simple



Conexión equipotencial

Conexión del cable de alimentación